

# ADAPTATEUR DE FLACON RAYDYLYO® 13 & 20 mm

L'adaptateur de flacon\* RayDyLylo® est un dispositif médical destiné à la reconstitution rapide et sûre de médicaments contenus dans des flacons, munis d'un bouchon en plastique RayDyLylo®. Après la reconstitution, le contenu du flacon est transféré dans une seringue ou tout autre dispositif médical pour l'injection/la perfusion. L'adaptateur pour flacons RayDyLylo® ne doit pas être utilisé avec des flacons sertis avec une capsule en aluminium ou tout autre bouchon en plastique.

## RESTRICTIONS ET RECOMMANDATIONS :

Suivez scrupuleusement les instructions du fabricant du médicament pour la reconstitution et l'administration du médicament.

Respectez scrupuleusement les recommandations et directives locales en matière de sécurité et d'hygiène.

L'adaptateur pour flacons RayDyLylo® est un dispositif à usage unique.

N'essayez jamais de réutiliser ou de restériliser l'adaptateur.

Une fois utilisé, l'adaptateur de flacon RayDyLylo® ne doit pas être retiré du flacon.

Jetez le dispositif usagé conformément à votre procédure locale.

\*Vial Adapter



### CONCU AVEC

	Ø 13mm	Ø 20mm
Une pointe en plastique (spike) du côté du flacon de médicament	●	●
Une connection luer lock femelle	●	●

### COMPATIBLE AVEC

	Ø 13mm	Ø 20mm
Les flacons et RayDyLylo® 13 mm	●	
Les flacons et RayDyLylo® 20 mm		●
Les poches de perfusion avec connection lock male	●	●
Les vial adapter avec connection luer lock male	●	●
Les seringues avec connection luer lock male	●	●
Les connections luer lock male	●	●

### FONCTIONNALITES SUPPLEMENTAIRES

	Ø 13mm	Ø 20mm
Fonction de guidage sur le côté du flacon	●	●
Fonction de verrouillage sur les poches de perfusion	●	●
Facile à utiliser	●	●
Conditionnement blister unitaire	●	●
Stérile	●	●

### MATIERE

	Ø 13mm	Ø 20mm
Polycarbonate (grade médical)	●	●

## ETIQUETAGE



Consulter les précautions d'emploi



Référence



Représentant autorisé dans l'UE



Attention



Apyrogène



Stérilisé par irradiation



Date d'expiration



Fabricant



Conforme aux exigences de la directive européenne 93/42/CE relative aux dispositifs médicaux

0459

N° d'identification de l'organisme notifié



Usage unique



Numéro de lot



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé



Uniquement sur prescription médicale

# INSTRUCTIONS D'USAGE

Respectez toujours les recommandations et directives locales en vigueur, en matière de sécurité et d'hygiène.

## Étape 1 :

Placez le flacon sur une surface propre et plane.  
Retirez la capsule colorée du flacon contenant le médicament.  
Appliquez le protocole approprié pour désinfecter le site d'injection du bouchon.

## Étape 2 :

Vérifiez l'intégrité de l'emballage et la date de péremption.  
N'utilisez jamais un adaptateur lorsque l'emballage est endommagé ou périmé.  
Retirez le couvercle de l'emballage blister.  
Ne jamais toucher l'adaptateur de flacon RayDyLyo® pour ne pas compromettre sa stérilité.

## Étape 3 :

Tenez fermement l'emballage blister, placez-le sur le flacon et appuyez fermement vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un clic.  
Le clic confirme que l'adaptateur est correctement positionné.

## Étape 4 :

Retirez l'emballage blister de l'adaptateur et jetez-le.  
Ne touchez jamais l'adaptateur de flacon RayDyLyo® afin d'éviter toute contamination.

## Étape 5 :

Tenez fermement le flacon et vissez la seringue.

## Étape 6 :

Transférez le diluant dans le flacon en appuyant lentement sur le piston de la seringue.

## Étape 7 :


Reconstituez le médicament selon les recommandations du fabricant du médicament.

## Étape 8 :

Retournez l'ensemble flacon-seringue et tirez lentement sur le piston pour aspirer la solution dans la seringue.

## Étape 9 :

Retournez à nouveau l'ensemble flacon-seringue en position verticale et déconnectez la seringue.  
Jetez le flacon avec l'adaptateur attaché en respectant les directives locales ou nationales.  
Suivez les instructions du fabricant du médicament pour injecter le médicament.

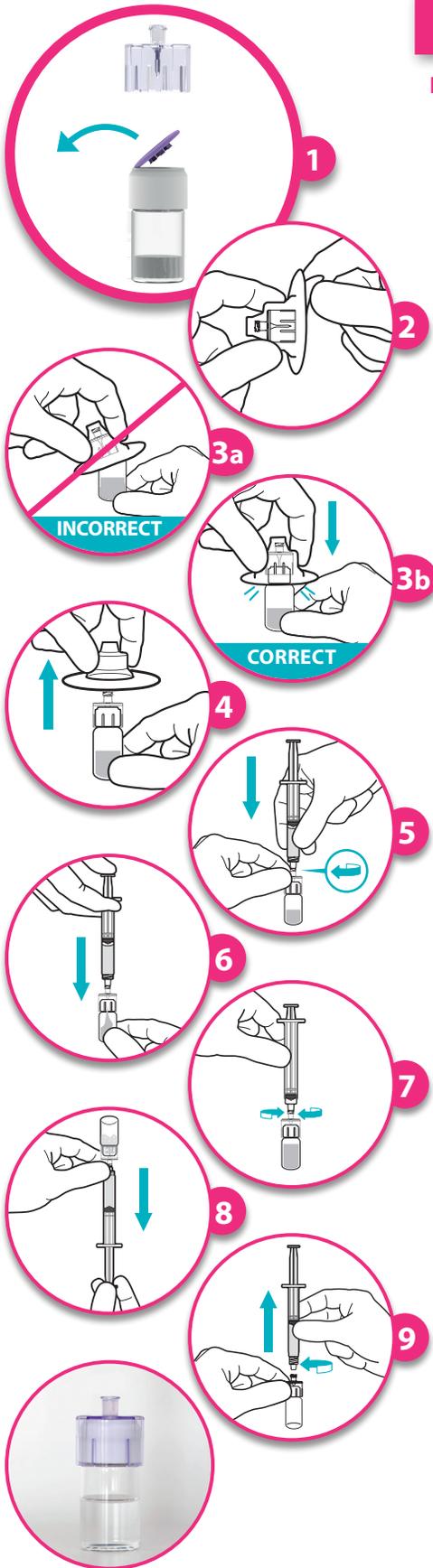

ARAYMONDLIFE SASU

Phone + 33 4 56 52 53 36

Email : contact@araymond-life.com

www.araymond-life.fr

05/2019 – © \* ARaymondlife SASU, (Registered N° : Grenoble 501 397 012) – 1 rue Louis Besançon - 38120 St Egrève - France a conçu cette notice.

\*\* « ARaymond Network » désigne un réseau d'entreprises indépendantes bénéficiant d'une licence d'utilisation d'ARAYMOND™. Cette notice est fournie uniquement à titre d'information et ne constitue ni une offre ni un accord ARaymondlife SASU ne formule aucune garantie, expresse ou implicite, concernant, de manière non limitative, l'exactitude, la fiabilité, la nouveauté, l'exhaustivité, l'adéquation à une fin particulière ou la valeur marchande des informations qu'il contient. Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, veuillez contacter ARaymondlife SAS.

ARaymond   
MORE THAN FASTENING